

Etching Gel

ÚČEL POUŽITÍ:

Leptací gel nebo kapalina se používají k leptání sklovin zubů, čímž se vytváří mechanická retence pro všechny techniky pryskyřic. Používá se zejména na sklovinu pro následující indikace:

- Kompozitní náhrady
- Adhezní cementace inlejí (kompozitních a všech keramických), korunek, fazet můstků, adhezních můstků a kořenových čepů
- Dlahy
- Lepení ortodontických nástavců
- Těsnění trhlin

SLOŽENÍ: Kyselina fosforečná, bidestilovaná voda, Pigment, gelovatelná činidla

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vyčistěte a osušte dutinu a zub.

Leptejte sklovinu zubu leptadlem po dobu 20 nebo 30 sekund. Opláchněte a osušte čistým vzduchem.

Pokud sklovina nemá drsný vzhled, proces opakujte.

VAROVÁNÍ:

- Udržujte mimo dosah dětí.
- V případě jakékoli změny původní funkce výrobku jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce.
- Vyhněte se kontaktu s okem. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pouze pro profesionální stomatologické použití

Leptadlo není dráždivé pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. V případě kontaktu s pokožkou omyjte postižené místo mýdlem v vodou. V případě dýchnutí vyčistěte nos vodou a je nutná lékařská pomoc. Před použitím těchto produktů vždy použijte kofferdam.

Někteří pacienti mohou mít alergie na leptadlo nebo kteroukoli jeho složku. V tomto případě pozastavte používání. Neskladujte při teplotě nad 24°C. Balení ihned poté uzavřete.

Kontraindikace: Materiál nesmí být použit, pokud není možné použít popsané techniky.

Záruka: Bestdent poskytuje záruku na výrobek na jakoukoli výrobní vadu nebo vadu materiálu. Společnost Bestdent nepřebírá odpovědnost za použití produktu v rozporu se zámýšleným účelem použití nebo v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s opatřeními, varováními a uvedenými kontraindikacemi. Jedinou její povinností je výměna vadného výrobku.

Pokud se při použití těchto produktů u pacienta nebo kohokoli jiného objeví nějaká anomálie, zašlete prosím podrobnou zprávu na adresu MEDENTAL INTERNATIONAL INC. medental_inc@hotmail.es

NENÍ NUTNÉ CHLADIT



MEDENTAL INTERNATIONAL, INC.
JOSE MARIA BUSTILLOS No. 28-BIS,
COL. ALGARIN C.P., 06880 MEXICO



IVONNE RICHAUD
CALLE ROGER DE FLOR 297, 2º, 3º
C.P. 08025 BARCELONA, ESPAÑA

CE
0473

