

Dezinfekce odsávacích zařízení

OROTOL ULTRA je vysoce účinný prostředek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a plivátek a hodí se i pro všechny odlučovače amalgamu.

Složení: 100 g **OROTOL ULTRA** obsahuje 22 g peroxoboritanu sodného, alkalické čisticí složky, komplexotvorné látky, tenzidy, speciální odpěnovače a pomocné látky.

Spektrum účinnosti: Baktericidní vč. Tbc, fungicidní, virucidní vč. HBV a HIV.

Návod k použití: **OROTOL ULTRA** se nasype z doplňovacího sáčku do zásobníku (viz obr.1). **OROTOL ULTRA** se používá jako 1% roztok. 10 g **OROTOL ULTRA** (t.j. obsah 1 dávkovací lžice se rozpustí v 1 litru vlažné vody (asi 30°C) a za použití OroCup nebo systému pro údržbu OROTOL se vysaje odsávacím zařízením (viz obr. 2 až 6.). Doba působení je 1 hodina. K inaktivaci obalených virů doporučujeme 1 % roztok a 2 hod. působení.

Doporučujeme odsávací zařízení s ohledem na zatížení dezinfikovat jednou až dvakrát denně s **OROTOL ULTRA** - před polední přestávkou a po skončení pracovní doby. Při jednorázovém postupu doporučujeme **OROTOL ULTRA** použít k dezinfekci a čištění zásadně večer po skončení práce. Plivátko se v každém případě dezinfikuje a čistí s 1 litrem roztoku (viz obr.7). Pro každé použití vezměte čerstvě připravený roztok.

Ekologie: **OROTOL ULTRA** je plně biologicky odbouratelný.

Upozornění: Po každém chirurgickém zásahu prosíme narázově 1 sklenici studené vody. Do odsávacího zařízení a plivátka se nedávají žádné pěnové čisticí přípravky.

První pomoc:

Při vdechnutí:	Zajistit čerstvý vzduch.
Při potřísnění kůže:	Okamžitě umýt vodou a mýdlem.
Při zasažení očí:	Vymývejte 10 - 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
Při požití:	Vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékaře a dejte k nahlédnutí obal nebo štítek.

Skladování a doba použitelnosti: Uchovávat v chladnu, ne pod 5°C a suchu. Chránit před sluncem.
Doba použitelnosti koncentrátu 2 roky, připravený roztok 1 den.

Likvidace obalů a zbytků přípravku: Zředěný lze vylít do odpadu, vypláchnuté obaly lze recyklovat.

Ch.B./ použitelný do: viz údaj na obalu.

Schváleno hlav. hygienikem ČR: HEM

OROTOL ULTRA dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice) a protichemické brýle. Dodržujte zásady osobní hygieny. Uchovávejte mimo dosah dětí!