

Orotol[®] plus

Dezinfekce odsávacích zařízení



Orotol[®] plus je vysoce účinný koncentrát pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a péči o stomatologická odsávací zařízení a plivátka a je vhodný pro všechny separátory amalgámu. Vybrané dezinfekční a čisticí složky dosahují intenzivní péče, a přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí a nepění.

Složení: 100 g Orotol[®] plus obsahuje: 8,8 g dimethyl-dioctylammoniumchloridu 50 %, 1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloridu 50 %, 5 - 15 g alkalické čisticí složky, < 5 g komplexotvorné látky, speciální látky zabraňující pění, pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, omezeně účinný i virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV¹⁾ a také neobalené viry, jako adenoviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 - 66, 2004).

Použití: Orotol[®] plus se používá v 2 % koncentraci. Příklad ředění: 20 ml Orotol[®] plus (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte studenou vodou do 1 litru a za použití OroCup odsajte. Doba působení je v souladu s VAH 5 minut, pro bakterie vč. Tbc 60 minut (viz tabulka v DE). Doporučujeme odsávací zařízení dezinfikovat a čistit přípravkem Orotol[®] plus v závislosti na provozu jedenkrát až dvakrát týdně - před polední pauzou a po ukončení ošetření; při jednorázovém použití pak výhradně večer po ukončení provozu. Plivátka event. ještě vydezinfikujte a vyčistěte dodatečně přípravkem Orotol[®] plus. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Po chirurgických zákrocích nárazově sáním ropláchněte sklenicí studené vody. Neaplikujte do sacího zařízení ani plivátka žádné pěnicí látky.

Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve

Orotol[®] plus

Dezinfekce odsávacích zařízení

sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0297

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de

2016-12

