

RIVA STAR AQUA

NÁVOD K POUŽITÍ

(KAPSLE)

Riva Star^{Aqua} je desenzitizér nové generace bez amoniaku, který okamžitě zmírňuje citlivost zubů.

INDIKACE PRO POUŽITÍ:

Desenzibilizace

hypersenzitivity cervikální oblasti zubu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u pacientů podstupujících léčbu štítné žlázy, kteří mají v anamnéze alergii na chemické látky, jako jsou stříbro, fluorid, draslík, a jód. Poznámka: V případě pochybností se před použitím poraďte s lékařem nebo odborníkem na alergie.


POSTUP:

1. Použijte profylaktickou pastu neobsahující fluorid, která je umístěná v gumovém pohárku, a očistěte zuby, které se budou ošetřovat, a sousední zuby.
2. Proveďte posouzení stavu zubů. Ošetřit by se měly být pouze zuby se zdravým dentinem a sklovinou.
3. Izolujte oblast, která se bude ošetřovat, pomocí vatových válečků.
4. Všechny exponované gingivální tkáně a rty chraňte vazelínou / kakaovým máslem a dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci ošetřovaného místa.
5. Riva Star Aqua Step 1: Stříbrným štětečkem, který je součástí balení, propíchněte otvor ve fólii stříbrno-modré kapsle a opatrně naneste roztok pouze na ošetřované místo.
6. Riva Star Step 2: Ihned poté použijte zelený kartáček, který je součástí balení, propíchněte fólii zelené kapsle a nanášejte velké množství roztoku na ošetřované místo, dokud se krémově bílá sraženina nezmění na průzračnou (pokud tato sraženina nebude průzračná, může dojít k výskytu zřetelných skvrn).
Poznámka: Naneste stejný roztok ze zelené kapsle na všechny ostatní povrchy zubů, které mohly přijít do kontaktu s roztokem z Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle). 7. Proveďte vysušení.
8. Odstraňte všechny ochranné/izolační materiály použité v ústech.
9. Použité kapsle a kartáčky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

DÁVKOVÁNÍ:

- Každá kapsle Riva Star Aqua Step 1 a Step 2 se může použít k ošetření až 5 zubů jednoho pacienta.
- Limit na jednu návštěvu je jedna (1) kapsle Riva Star Aqua Step 1 a jedna (1) kapsle Step 2. V případě potřeby lze po 1 týdnu aplikovat druhou dávku Riva Star Aqua.

Obr. 1 Jak propíchnout kapsli

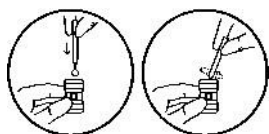

1. K propíchnutí fólie na kapsli použijte barevně označený štěteček.
2. Kruhovým pohybem zatlačte fólii k hraně otvoru.



UPOZORNĚNÍ:

- Pouze pro profesionální použití.
- Léčbu neopakujte u těhotných nebo kojících žen.
- Pacient musí být před ošetřením informován o možném výskytu skvrn.
- Zamezte kontaktu roztoku z Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle) s měkkými tkáněmi v ústech, očima a kůží. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, postupujte podle sekce „PRVNÍ POMOC“ uvedené níže.
- Zamezte kontaktu roztoku z Riva Star Step 2 (zelená kapsle) s očima.
- Neznečistlivujte zuby s měkkým dentinem, protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn.

Poznámka: Pokud k tomu dojde, lze místa, která obsahují skvrny, vyčistit přiměřeným leštěním pemzou impregnovanou kyselinou fosforečnou a poté zakrýt samovytvrzovacím skloionomerním cementem (jako je Riva Self-Cure, SDI Limited).

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nepožívejte. Roztok z Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle) způsobí skvrny (viz „MANIPULACE SE SKVRNAMI“).
- Při manipulaci noste rukavice a ochranu očí.
- Pouze pro jedno použití.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Upozornění: Z ákon omezuje prodej tohoto zařízení. Toto zařízení smí být prodáváno pouze zubním lékařem nebo na jeho příkaz." Roztok Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle) obsahuje 0,06 g/ml fluoridových iontů.
- SDS (Bezpečnostní datové listy) jsou k dispozici na www.sdi.com.au nebo kontaktujte svého zástupce SDI.

SKLADOVÁNÍ. Fólie ze stříbrno A -MANIPULACE:modré ani zelené kapsle Riva Star Aqua nepropichujte, dokud nebude připravena k použití.

- Skladujte na chladném a tmavém místě při teplotách mezi 2 °C a 25 °C (35 °F a 77 °F).
- Používejte při pokojové teplotě mezi 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F).

PRVNÍ POMOC:

- Oči (kontakt): Roztáhněte oční víčka a oči kontinuálně proplachujte tekoucí vodou. Pokračujte ve vyplachování, dokud vám Toxikologické informační středisko (Austrálie, 131 126) nebo lékař neřeknou, abyste přestali, nebo po dobu nejméně 15 minut.
- Pokožka / měkká tkáň v ústech (kontakt): Odstraňte kontaminovaný oděv, zasažené místo opláchněte tekoucí vodou (v případě, že se vytvoří strup, měl by zmizet do 24–48 hodin).
- Požití: Neočekává se z důvodu objemu dávky. Pokud k němu dojde, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte sklenici mléka nebo vody. Pro radu se obraťte na Informační centrum pro jedy nebo na lékaře.
- Vdechnutí: Neočekává se z důvodu objemu dávky. Pokud k němu dojde, odneste/odved'te postiženou osobu z kontaminované oblasti.

MANIPULACE SE SKVRNAMI:

- Pokožka: V případě kontaktu pokožky s roztokem Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle) aplikujte roztok Riva Star Step 2 (zelená kapsle) jemným třením. Skvrna pomalu zmizí. Pokud se ale Riva Star Step 2 nepoužije, skvrna by měla po několika dnech postupně zmizet.
- Oblečení: Odstraňte kontaminovaný oděv a namočte ho přes noc do přípravku Napisan* (nebo jiného prostředku na odstraňování skvrn z textilu) a poté ho vyperte běžným způsobem.
- Tvrdé povrchy: Okamžitě aplikujte bělidlo k domácímu použití (chlornan sodný) a poté setřete vodou. V případě odolných skvrn napus't'te papírový ubrousek bělidlem k domácímu použití a položte ho na postiženou oblast. Nechte působit přes noc a setřete vodou.

Napisan* není registrovanou ochrannou známkou společnosti SDI Limited.



BALENÍ:

Každá sada obsahuje:

- 10x Riva Star Aqua Step 1 (stříbrno-modrá kapsle)
- 10 x Riva Star Step 2 (zelená kapsle)
- Příslušenství

Udělené americké patenty.

Výrobce:

SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia

www.sdi.com.au

Poslední revize: 02-2021

www.schafferova.cz

Distributor pro ČR:

Schafferová s.r.o.

Andělská 29

779 00 Olomouc

Tel.: 585 757 200 - 201